



S3

 PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER

ARK HORSE

Användarmanual

Innehållsförteckning

S3

 PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER

Säkerhetsinformation

ADMINISTRERING

Varning: Underlåtelse att följa dessa säkerhetsinstruktioner skulle kunna resultera i en brand, elstöt, personskador eller skador på din S3-skanner. Läs hela manualen och alla säkerhetsinstruktioner innan du använder dig av S3-skannern för att garantera en säker och korrekt användning.

Denna skanner är ett väldigt känsligt vetenskapligt beräknande instrument. Den bör alltid hanteras försiktigt.

ELEKTRISKA VARNINGAR

Vatten och fukt: Undvik att utsätta din S3-skanner för regn eller fukt för att minska risken för elstötar. Använd inte S3-skannern i närheten av vattenkällor som badkar, tvättställ, diskhoar, tvättmaskiner, våta källare, pooler eller andra vätskebehållare. Ta omedelbart ut enheten från eluttaget om vätskor spills i närheten av S3-skannern medan den är ansluten till sin elkabel. Om vattenskador uppstår, kontakta den tekniska supporten. Om S3-skannern inte är ansluten utan drivs på batteri, rör inte enheten och kontakta teknisk support för instruktioner.

Underhåll: Ta inte bort skärmskyddet eller nederdelen av S3-skannern och försök inte att reparera enheten själv. Demontering av enheten kan skada den eller orsaka dig personskador. Det finns inga delar inuti som kan bytas ut av användaren. Endast kvalificerade Pharmanex-tekniker bör utföra underhåll på skannern.

Elkablar och nätaggregat: Plugga inte in någon elkabel eller något nätaggregat i S3-skannern, förutom de som medföljer via köp/leasing av skannern. Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Den jordade kontakten kommer endast att passa jorduttag med matchande öppningar. Använd endast jordade förlängningssladdar med S3-skannern. Använd endast fabriksmedföljande elkablar.

Temperatur: Placera aldrig din apparat nära eller över ett element eller annan värmekälla. Undvik att lämna din apparat i en överdrivet varm eller kall miljö under en längre tid. Den optimala förvaringstemperaturintervallen för enheten är mellan 5 och 40 grader Celsius (40 till 110 grader Fahrenheit).

ALLMÄNNA VARNINGAR

Ögonsäkerhet: S3-skannern använder LED-lampor (lysdioder) som ljuskälla. LED-lampor finns i hushållsbelysning, elektronik och vanliga ficklampor. De anses inte vara skadliga för ögat, men du bör undvika direkt ljus från en LED-lampa eller från någon annan stark ljuskälla nära ögat under långa tidsperioder.

Känsliga optiska komponenter: S3-skannerns optiska komponenter kan skadas om de utsätts för starkt ljus. Skanna inte reflektiva ytor som speglar eller metallobjekt som kan återspegla ljuset till S3-skannern. Skanna inga ljusa objekt av något slag. Rikta inte S3-skannern mot ljusa lampor eller solen. Täck skannerns nos med det mörka locket när enheten ska placeras på ett väldigt ljus område och närhelst enheten inte används under en lång tidsperiod. Om du ignorerar dessa rekommendationer kan du skada de känsliga optiska komponenterna på insidan av S3-skannern.

Kvävningsrisk/små delar: S3-skannern har två små lock som skyddar de känsliga optiska komponenterna. Dessa små delar skulle kunna innebära en potentiell kvävningsrisk. Förvara din S3 oåtkomligt för barn.

Användarbegränsning: Enheten får inte användas på något annat sätt än det som anges av Nu Skin. Underlåtelse att följa dessa villkor vid användning av enheten kan försämra enhetens säkerhetsfunktioner.

UNDERHÅLL

Skanneroperatörer och icke-godkända tredje parter bör aldrig utföra underhåll på S3-skannern. S3-skannern bör aldrig öppnas eller demonteras, förutom av utbildade Pharmanex-tekniker. Om höljet på din S3-skanner spricker eller går sönder, försök inte att nå de interna komponenterna eller dess elkrets. Exponering för kretsen kan öka risken för brand eller elektrisk stöt. För att undvika risken för elstötar, stäng av skannern, dra ut enheten från strömkällan direkt (om tillämpligt) och returnera S3-skannern till Nu Skin för underhåll.

OBS! Om höljet har skadats på något sätt, någon del av det har tagits bort eller om det finns bevis på försök att ta bort höljet kommer försäkringen för S3-skannern inte att gälla. Skannerns leasingtagare kommer även att hållas ansvarig för hela kostnaden för S3-skannern.

Villkor om underhåll: Om något av följande sker, stäng av din S3 och dra ur kontakten ur vägguttaget (om tillämpligt) och ring den tekniska supporten.

- Elkabeln eller kontakten är skadad.
- Det har råkat komma vätska på enheten eller något objekt har fallit på den (eller in i den).
- Skannern är våt från kondensation eller exponering av regn eller vatten.
- S3 fungerar inte som den ska när du följer de vanliga användarinstruktionerna.
- Någon har tappat skannern eller så har skyddet blivit skadat.
- S3-skannern visar en förändrad prestanda, såsom oförmåga att utföra grundläggande funktioner.
- Skannern visar en felkod eller graf även efter att den har startats om flera gånger.
- S3 Scanner App uppmanar dig att ringa den tekniska supporten.

Viktigt

SYFTE

Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 är ett verktyg som beräknar karotenoidvärdet i huden. Den är inte avsedd för medicinska syften. Den är inte en medicinsk utrustning eller ett medicinskt verktyg för diagnosticering av något slag, den kan inte diagnosticera, behandla, mildra, bota eller förhindra någon sjukdom eller påverka strukturen eller funktionen i någon del av kroppen.

KALIBRERING

Alla vetenskapliga precisionsinstrument kräver kalibrering. De flesta av dem kalibreras dagligen och vissa kalibreras efter varje beräkning. Första gången du ansluter S3-skannern till appen kommer enheten att utföra en automatisk kalibreringsskanning. När kalibreringsskanningen är slutförd kommer du att kunna använda enheten som vanligt. S3-skannern kommer att utföra en självkalibreringsskanning en gång per dygn. Se avsnittet Ansluta till S3 Scanner App för mer information om kalibreringsskanningar.

DRIFTTEMPERATUR

De miljömässiga förhållanden där du förvarar och använder skannern kan påverka enheten. Skannern är utformad för att användas i omgivningstemperaturer på mellan 10 och 35 °C. Den optimala skanningstemperaturen är 20 till 25 °C. S3-skannern bör inte förvaras eller transporteras i temperaturer över 40 °C eller lägre än 5 °C. Om du lämnar din S3-skanner i bilen en varm eller kall dag kan det påverka dess prestanda och skada enheten.

Om skannern förvaras i en temperatur som skiljer sig från de driftsförhållanden som beskrivs ovan (såsom i en bil över natten) måste du ge S3-skannern tillräckligt med tid för att acklimatisera sig till rätt omgivningstemperatur innan installation och kalibrering. Låt det ta cirka 30 minuter för S3-skannern att anpassa sig efter dess miljö, innan du pluggar in den i ett strömuttag eller försöker kalibrera den.

RESA MED DIN S3-SKANNER

När du reser med skannern, se till att du förvarar den i det medföljande fodralet eller i något liknande vadderat och säkert fodral. Om du ska flyga med din S3-skanner, se till att den följer med som handbagage. Detta minimerar risken för ökad elstöt, skador och exponering av extrema temperaturer associerade med incheckat bagage. Extrema temperaturer som under nollstrecket eller över 40 °C kommer att skada skannerns sköra elektroniska komponenter. Kom ihåg att S3 är en extremt känslig vetenskaplig enhet och att den alltid bör behandlas varsamt.

Installera din S3

Kontrollera innehållet i din S3-låda och se till att det finns:

- ① En S3 Biophotonic Scanner
- ② En svart laddkabel
- ③ (2) lock



LADDA SKANNERN

Skannern bör anslutas till ett jordat eluttag och laddas med det medföljande nätaggregatet i minst en (1) timme innan du försöker att använda din S3.

Plugga in den medföljande elkabeln på baksidan av skannern och sedan i det jordade vägguttaget. LED-lampan på baksidan av skannern som indikerar laddning av din S3-skanner kommer att lysa grönt. Skannern kommer att utföra upp till 600 skanningar när den är fulladdad.



INSTALLERA S3 SCANNER APP

För att kunna använda S3 BioPhotonic Scanner kommer du att behöva installera S3 Scanner App på din iPad, iPhone eller Android smartphone (kommer snart). Appen finns i Apple Store eller i Google Play-butiken och du hittar den genom att söka efter "S3 Scanner", "Pharmanex Scanner" eller "BioPhotonic Scanner". S3 Scanner App har inte utformats för användning med Android-surfplattor. Installera S3-appen på din enhet och ge appen ditt samtycke.

Det krävs en internetanslutning för att appens många nya funktioner ska fungera. Enheten du använder med S3-appen bör anslutas till internet, antingen via telefonens nätverk eller via en Wi-Fi-uppkoppling. Om appen inte är ansluten till internet kommer du inte att kunna logga in. Följ instruktionerna som följer med vid köp av din enhet för att se till att det finns en internetuppkoppling innan du försöker logga in i S3-appen.

ÖPPNA S3 SCANNER APP

Efter att installationen av S3-appen har slutförts, öppna appen genom att klicka på ikonen Scanner App. Ikonen bör finnas på din enhets huvudsida eller i applistan.

LOGGA IN PÅ ETT BEFINTLIGT KONTO

S3-appen kräver att du är registrerad användare för att logga in. Användare kan logga in genom att använda ett befintligt NSE-konto. Om ett nytt konto krävs, besök www.nuskin.com. För att logga in, ange bara kontots e-post/ID och lösenord i textfältet och klicka sedan på knappen .


✓ IN I APPEN?

Personer som loggar in i S3 Scanner App kommer generellt sett att falla in under två olika kategorier: 1) S3 Skanneroperatörer och 2) Skannade personer.

S3-skanneroperatören är den primära leasingtagaren/ägaren av S3 Scannern. När en skanneroperatör loggar in i appen kommer han/hon att kunna skanna personer och få åtkomst till olika rapporter och verktyg relaterade till skannerprogrammet.

Skannade personer är personer som vill ha mer information om sina kartenoidvärden och som kan komma att vilja köpa produkter. De måste ha ett befintligt kund/återförsäljarkonto för att kunna logga in i appen och nå sina skannade data. En skannad person som loggar in i ett konto kan använda appen för att skanna om, spåra värden över tid, göra dynamiska värdesjämförelser eller köpa certifierade skannerprodukter.

Personer som ska skannas behöver inte nödvändigtvis ha ett konto för att skannas med BioPhotonic Scanner, även om det hjälper till att spåra deras värdeförlopp och gör den månatliga skanningen mer bekväm.

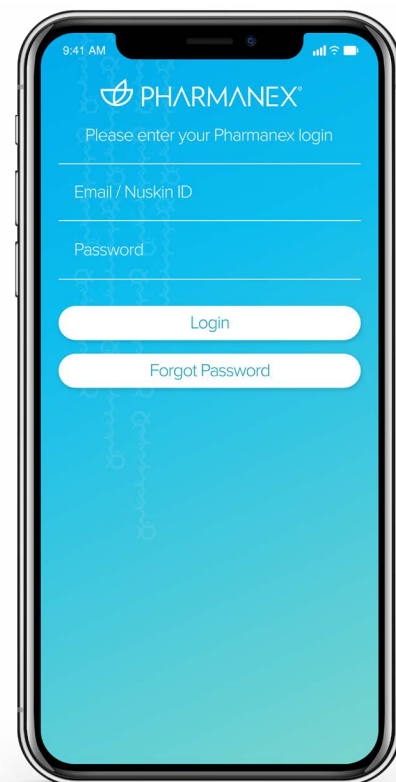

AKTIVERA S3-SKANNERN

S3-skannern drivs med sitt återuppladdningsbara batteri. När batteriet är laddat kan S3-skannern kopplas bort från strömkällan och användas kontinuerligt utan sladdar i flera timmar.

Slå på S3-skannern genom att trycka på startknappen på skannerns baksida. S3-skannern bör visa en blå uppstartsikon och sedan ikonen S3.

WARNING: Se till locket täcker S3-skannerns front innan den slås på. S3-skannern kommer inte att aktiveras om den inte känner av locket.

AKTIVERA BLUETOOTH

Tryck och håll ner Bluetooth-knappen på skannerns baksida (till höger om startknappen) i tre sekunder, tills dess att den börjar att blinka. Den blinkande LED-lampan visar att S3 nu sänder en Bluetooth-signal så att den kan anslutas till andra enheter. Nästa gång du slår på din skanner behöver du inte trycka på Bluetooth-knappen igen. Det krävs inte längre för efterföljande anslutningar.

ANSLUT TIL S3 SCANNER APP

Appen kommer att uppmana användaren att ansluta till skannern via Bluetooth när han/hon försöker utföra någon skanningsfunktion. Appen kommer att visa en sida som säger "Anslut till en skanner" med pilar under texten.

Se till att Bluetooth-knappen på S3-skannern blinkar och dra sedan ner pilarna på appens pekskärm. Detta låter appen veta att den ska söka efter S3 Bluetooth-signaler.



Om din S3-enhets CS-nummer inte finns listat, dra pilarna neråt igen. Störningar kan ibland försvåra den första detektionen.

Appen kommer att visa en lista av tillgängliga skannrar. Klicka på S3-skannerns CS-nummer för att ansluta till den. En liten vit ikon av skannern och dess CS-nummer bör nu vara synlig i appens övre vänstra hörn. S3 och appen är nu sammanlänkade.

OBS! Första gången du ansluter din enhet till skannern kommer S3 att utföra en kort kalibreringsskanning. Skannerikonen i appen kommer att visa att den fungerar och baksidan av S3-skannern kommer att visa återstående tid för kalibreringen. Skannern kommer att utföra liknande kalibreringsskanningar en gång var 24:e timme vid anslutning till appen.

Om S3-skannern och appen har länkats ihop kommer de automatiskt att försöka detektera och kommunicera med varandra när de är aktiverade, även om de är bortkopplade i appen.

VIKTIGT: Endast en S3-skanner kan länkas till appen på en och samma gång.

INFORMATION OM BLUETOOTH

Bluetooth och Wi-Fi möjliggör olika funktioner. Wi-Fi låter enheten få åtkomst till internet. Bluetooth är en lokal signal mellan två enheter.

Bluetooth-länken mellan S3-skannern och appen kommer att ha en maximal räckvidd på cirka 50 meter. Störningar från olika källor kan minska Bluetooth-anslutningens räckvidd. Om S3-skannern och appen är för långt bort från varandra kommer anslutningen att misslyckas och de kommer att behöva återansluta.

SLÅ AV S3-SKANNERN

Gör följande för att slå av S3-skannern:

1. Gå ut ur appen genom att klicka på telefonens eller iPadens Hem-knapp.
2. Slå av din S3-skanner genom att trycka på startknappen på baksidan av enheten. Tryck inte på Bluetooth-knappen när du vill stänga av enheten. Det behövs inte längre.
3. Placera det mörka locket på fronten för att undvika skador på elektroniken.
4. Förvara S3-skannern i sin bärväska när den inte används.

S3 Scanner App

INTRODUKTION

S3 Scanner App är det primära gränssnittet som operatörer kommer att använda med S3-skannern. Appen består av många användbara och praktiska egenskaper och har utformats för att vara så enkel som möjligt. Läs dessa instruktioner ordentligt för mer information om denna kraftfulla app.

VANLIGA APPFUNKTIONER

Det finns många funktioner i S3-appen som kan ses på flera skärmar.



BAKÅTPIL

Klicka på en tillbakapil för att återvända till den föregående skärmen



DELA

Klicka för att dela information på ett konto på sociala medier



ANTECKNINGAR

Klicka för att skapa eller redigera anteckningar i en inskanning i ett konto



INFORMATION

Klicka för att läsa instruktioner eller få utbildning i appen




PROFIL

Klicka på din profil för att visa information om användarprofilen

LANDNINGSSIDAN

Efter att ha loggat in och anslutit till S3-skannern kommer appen att ta användaren till startsidan med flera olika flikar längst ner. Som standard kommer appen att starta med fliken Skanna aktiverad. Det finns vissa vanliga element över alla flikar i appen:

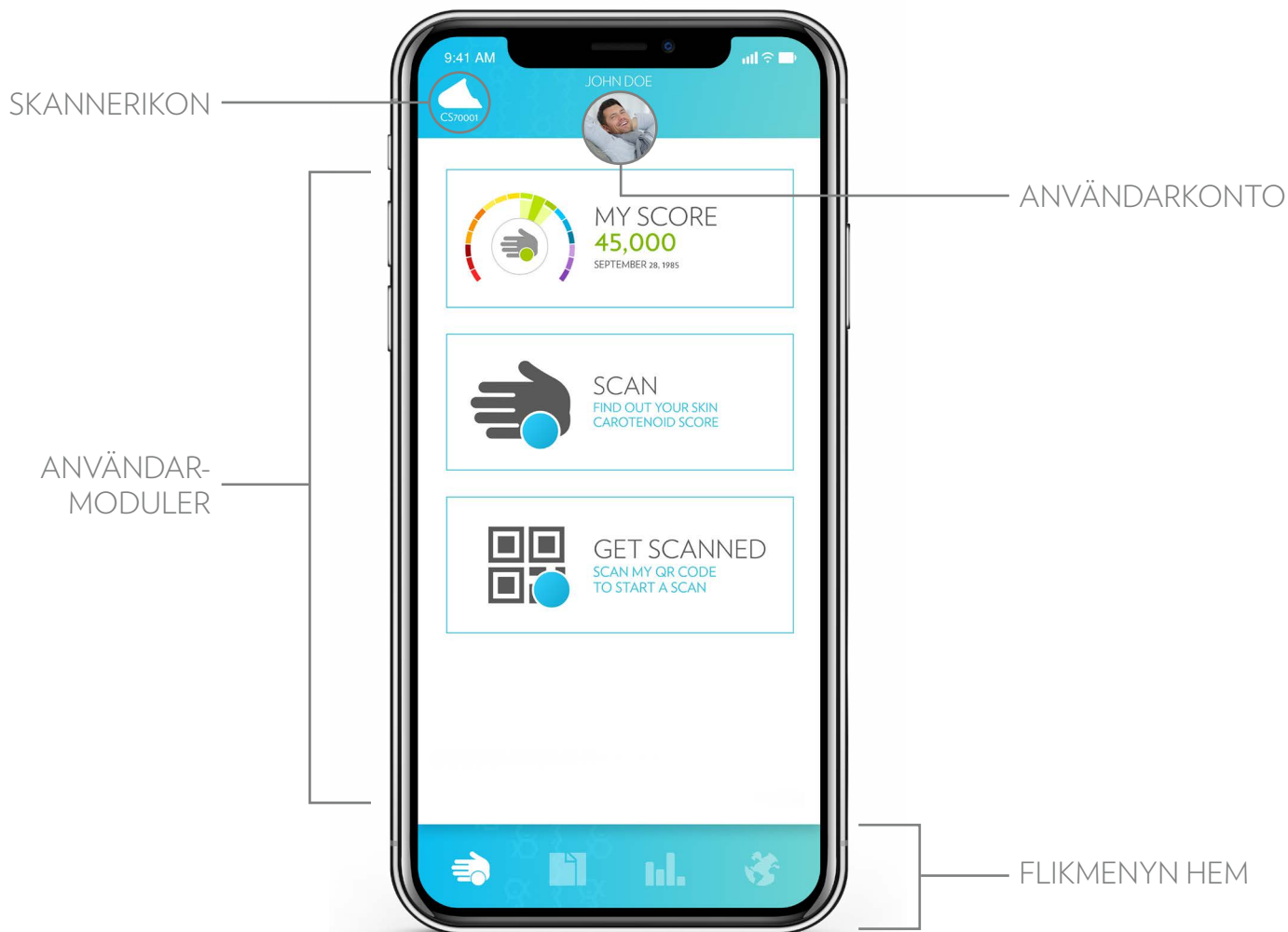

Varje flik i appen kommer att visa olika moduler i huvudfönstret, men alternativen högst upp och längst ner kommer att vara desamma.

SKANNERIKONEN

SKANNERIKONEN visar S3-skannerns befintliga status tillsammans med S3-numret för skannern som för närvarande är ansluten till enheten. Om du klickar på denna ikon kommer en skärm att öppnas som låter dig koppla bort dig från skannern eller utföra en 30 sekunders kalibreringsskanning. Indikatorer av skannerstatus inkluderar följande statusar:



ANSLUTEN

Appen är ansluten till S3-skannern



BORTKOPPLAD

Appen är bortkopplad från S3-skannern.



SÄTT PÅ LOCK

Placera det mörka locket på proben för att kalibrera S3-skannern



ANSLUTER

Appen försöker nu att ansluta till S3-skannern



KALIBRERAR

Skannern utför en kalibreringsskanning

IKONEN AVÄNDARKONTO

Ikonen Användarkonto visar vilket konto som för närvarande används i appen. Kontot styr vem som mottar krediter för skanningar som utförs med S3-skannern, vars köpta skannerkrediter används för skanning, och i vilket konto de skannade värdena lagras.

Om du klickar på ikonen Användarkonto kommer en meny att öppnas som låter användaren anpassa sin profil, ställa in appspråk, ändra aviseringsalternativ eller logga ut från appen.



Användarprofil

Alternativet Användarprofil öppnar upp en skärm med en tabell över de demografiska beskrivningarna. Klicka på varje alternativ för att fylla i profiluppgifterna. Dessa data bidrar anonymt till skannerns databas. Kunskapen i databasen låter appen utföra dynamiska jämförelser, värdesrapporter och många andra praktiska funktioner. Ju mer information appen får, desto bättre!

Alternativ som inte har information kommer att vara gråfärgade. Alternativ som har fyllts i kommer att vara blåfärgade. Klicka på knappen Tillbaka efter att all profilinformation har fyllts i.




Språk

Ikonen Språk låter dig välja det språk som ska användas för appen.




Logga ut

Klicka på Logga ut för att avsluta användningen av det befintliga kontot i appen eller för att logga in med ett annat konto.

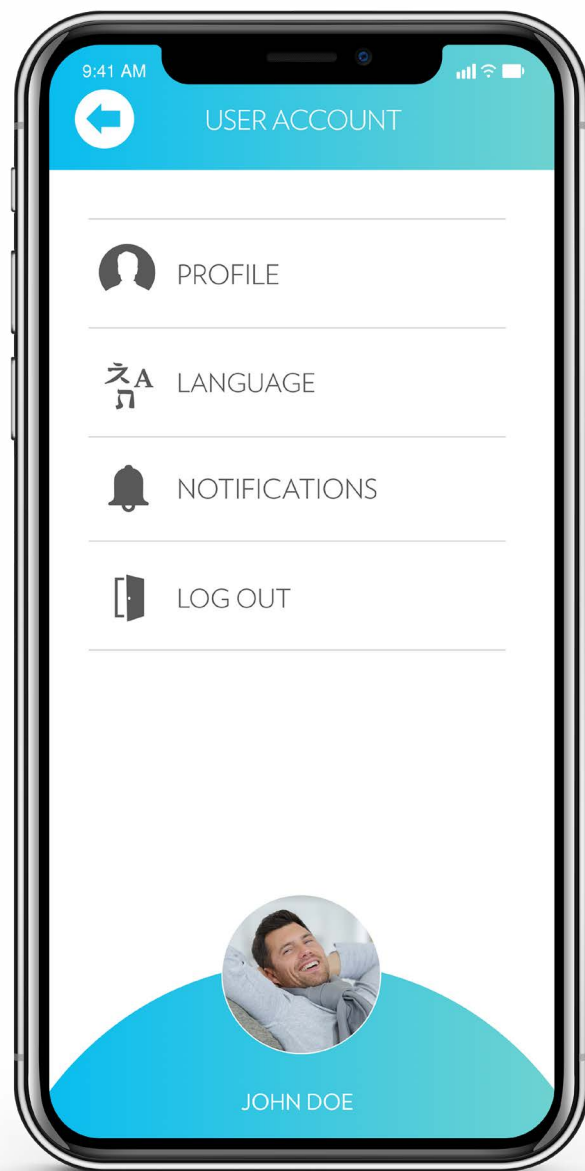

MENYN HEM

Längst ner i appfönstret finns en meny med fyra ikoner. Dessa inkluderar flikarna Skanna, Poster, Rapporter och Support. Genom att klicka på dessa olika flikar kommer olika användarmoduler att öppnas i appens huvudfönster. Menyn Hem kommer att vara din primära metod för att navigera igenom appens funktioner och använda din S3.

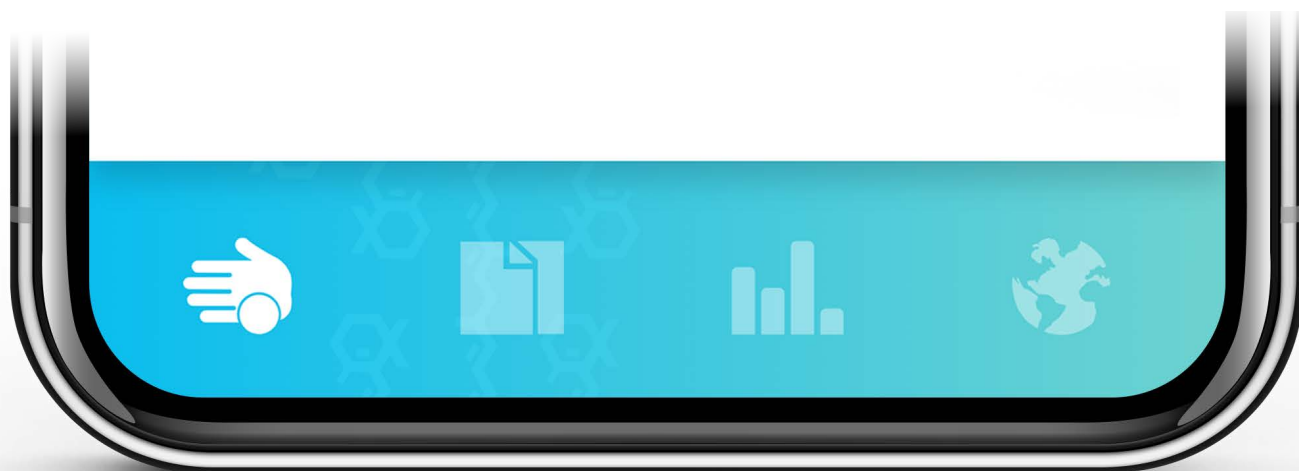

FLIKEN
SKANNA

FLIKEN
POSTER

FLIKEN
RAPPORTER

FLIKEN
SUPPORT

Fliken Skanna

Fliken Skanna innehåller moduler som låter dig skanna med din S3-skanner. Den låter dig även visa dina personliga resultat och din värdehistorik/dina värdestrender. Genom att klicka på ikonen Skanna kommer tillgängliga skanningsmoduler att visas för dig.





MITT RESULTAT

45 000

29 september 2018

MODUL

Modulen Mina resultat används för att se historiken över en persons egna personliga skanningar. Denna modul kommer inte att visa någon information förrän användarkontot har minst en slutförd skanning. Det finns flera funktioner i denna modul:

Mitt resultat

Genom att klicka på modulen Mina resultat kommer att ta användaren till skärmen Mina senaste värden. Användarens senaste värden visas på skannerskalan i mitten av skärmen. Delen av skalan med användarens senaste resultat markeras. Andra delar på skalan kan markeras genom att du klickar på dem, men användarens senaste värden kommer alltid att indikeras på skalan.

Under faktorikonerna finns det fem knappar som låter dig lära dig mer om skanningen.

Jämför

Knappen JÄMFÖR längst ner tar användaren till det dynamiska jämförelseverktyget. Dynamiska jämförelser är ett kraftfullt verktyg för att visa hur användarens senaste skannervärden jämförs med resultat från olika demografiska grupper. Det blir kraftfullare ju fler användare som fyller i sina profiluppgifter.

Grafiken i huvudfönstret visar användarens senaste skannade värde och det datum skanningen genomfördes. Grafen kan ändras dynamiskt genom att lägga till nya parametrar via rutorna nedan. Genom att klicka i parameterrutan "Man" kommer resultatet att jämföras mot medelvärdet för alla andra män i databasen.

Det går att klicka i olika parameterrutor för att få mer kompletta grafer. De kan exempelvis visa hur deras värden står sig mot värden från kvinnor som inte tar kosttillskott eller som endast äter två portioner frukt och grönt per dag.

Datan är användbar när den används på rätt sätt. Genom att utforska alternativet Dynamisk jämförelse kan man hjälpa andra att ta viktiga beslut som kan förbättra deras värde. Klicka på pilen Tillbaka för att komma tillbaka till sidan Mina resultat.

Trend

Klicka på knappen TREND för att visa en historik över skannade personer på S3-skannern. Skannerhistoriken är ett stapeldiagram som visar de fem senaste skanningarna för den skannade personen. Den skannade personen kan använda detta för att spåra sin förbättring och se hur S3-certifierade produkter förbättrar hans/hennes värde. Under Skanningshistorik finns det en linjegrav med årliga trender som visar den skannade personens genomsnitt under de senaste 12 månaderna. Klicka på pilen TILLBAKA för att komma tillbaka till sidan Mina resultat.

Skanningsnummer


Klicka på knappen SKANNERNUMMER för att växla mellan att visa faktorikoner och skannernumret.

Handla

Knappen HANDLA kommer att ta användaren till en webbsida där de kan köpa produkter från Nu Skin Enterprises. Butikssidan kommer att variera beroende på de lokala marknadskraven.

Omskanning

Användaren kan trycka på knappen OMSKANNING på skärmen Mina resultat för att påbörja en ny självskanning eller lägga till dem i sin skannerhistorik. En omskanning kommer att använda en digital skannerkredit.

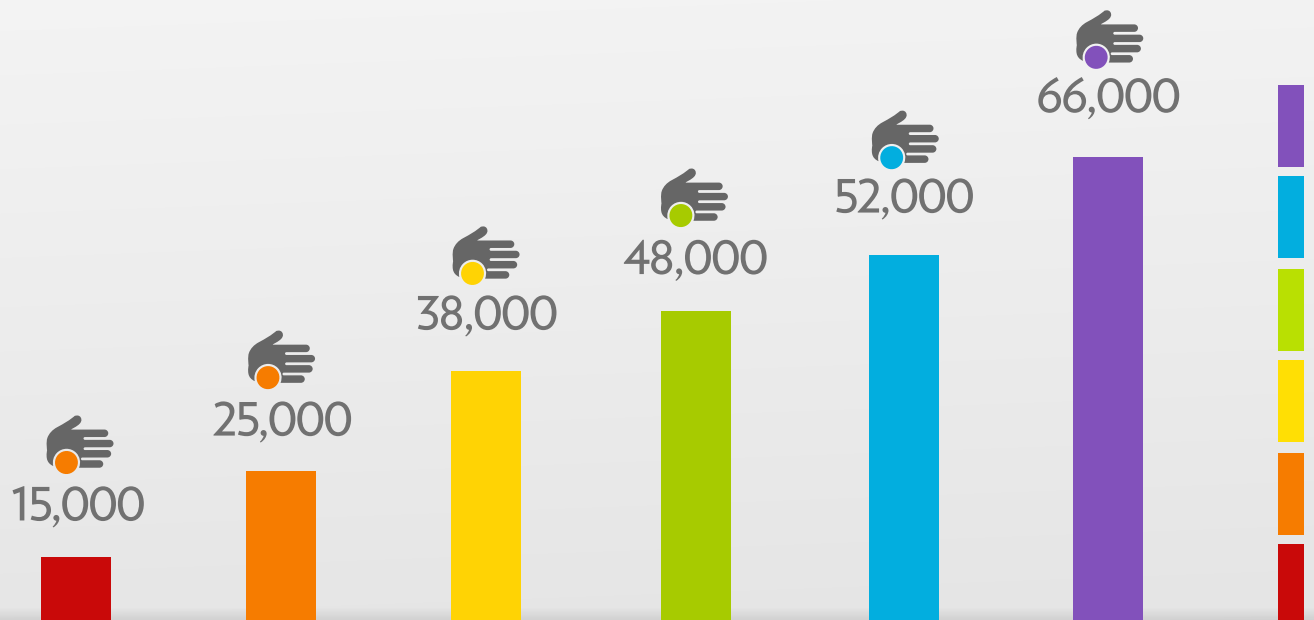



Modulen Skanna är den primära skanningsfunktionen för de flesta operatörer. Normala skanningar är engångshändelser och är lämpliga när en användare är inloggad i appen med sitt konto och önskar lagra resultat för omskanningar och skanningsgrupper.

Här kan du välja en tidigare skannad person, skanna en annan appanvändares QR-kod eller utföra nya skanningar.

OBS! Du kan köpa till ytterligare skanningskrediter genom att klicka på numret längst upp på det högra hörnet och följa köpprocessen.

Personer i listan som visas på skärmen är skannade personer som är tillgängliga för en omskanning. Välj en av dessa för att påbörja en omskanning av den personen. Du kan även identifiera den skannade personen genom följande metoder:

QR-kod ID

Längst ner på skärmen visas två knappar. Knappen QR-kod ID kommer att använda enhetens kamera för att skanna en QR-kod som identifierar personen som ska skannas. Varje skannerkonto har ett QR ID kopplat till sig och det kan nås genom att klicka på modulen "Bli skannad".

Skapa ett nytt konto för skannade personer.


Genom att klicka på knappen Ny skannad person öppnar appen skärmen där operatören kan ange ett namn och en e-postadress. Om man anger dessa uppgifter kommer ett nytt konto att skapas för personen som ska skannas för första gången.

Konton för skannade personer som skapas med denna knapp kommer först endast att innehålla namn och e-postadress. Skannade personer kan sedan lägga till mer information i sin användarprofil genom att logga in i appen med sin iPhone eller iPad.

Efter att en skannad person har valts öppnar appen en sidan där skannern väntar på en skanning. Skannerskalan kommer att visa sidans mitt och appen kommer att säga "Väntande".

Ta bort locket från skannerns nos och låt den skannade personen placera sin handflata på mätproben. Skannern kommer att upptäcka handen och sedan säga att den "Startar".

När skannern är redo kommer den att starta skanningen och ange "Skanning". Om användaren lägger sin hand ordentligt på skannern, kommer S3:n att utföra skanningen och visa resultaten.

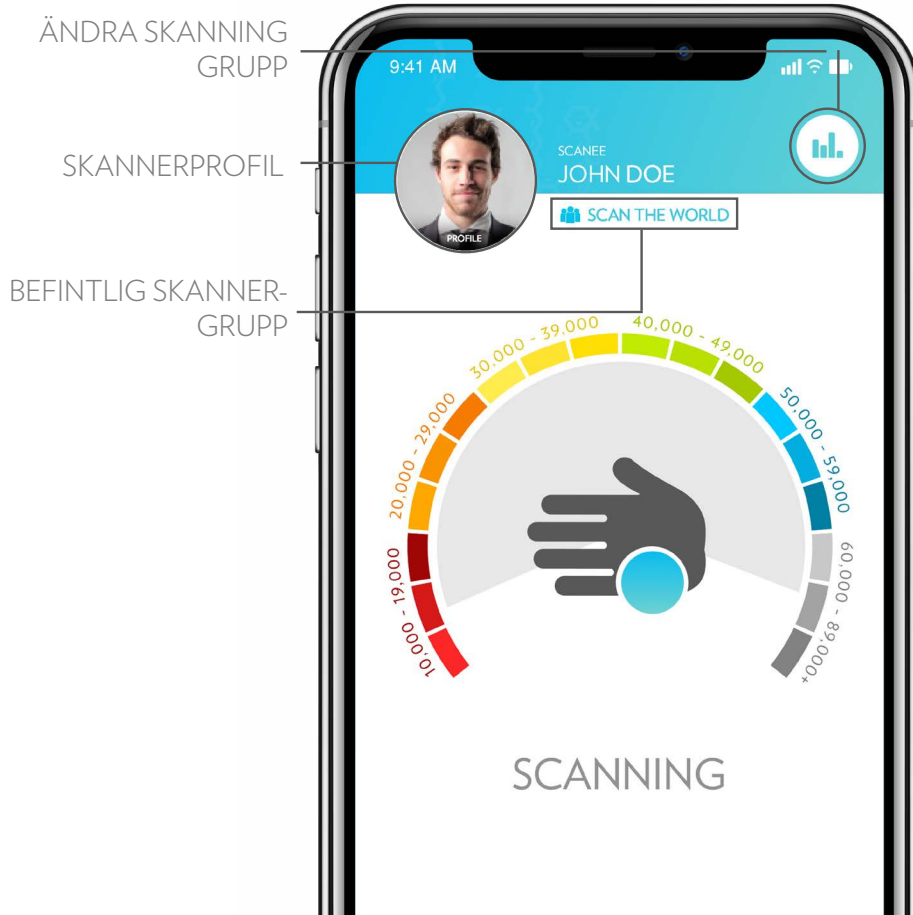

Under skanningen kan operatören trycka på användarens profilikon längst upp på skärmen och lägga till demografisk information, om så önskas. Under inmatning av den demografiska informationen kommer skannerförloppet fortfarande att visas i en liten skannercirkel uppe till vänster på skärmen. Tryck på skannercirkeln för att återgå till skärmen Skannerförlopp.

Skanningsresultaten kommer att visas med några knappar längst ner. Om man klickar på knappen **FAKTORER** kommer en kort information om kostvanor och kosttillskottsintag som generellt sett är relaterade till skannervärdet. Du kan även klicka på varje färgzon för att se hur faktorerna jämför över zonerna.

Knappen **JÄMFÖR** tar dig till det dynamiska jämförelseverktyget för att visa hur detta värde står sig mot andra värden med vissa demografiska egenskaper.

Knappen **TRENDER** kommer att visa historik och trendgrafer.

Knappen **HANDLA** tar dig till nuskin.com för att påbörja ett köp.

Nu kan du även lägga till anteckningar i skannerposten för senare referens. Denna anteckningsknapp återfinns på resultatsidans övre högra hörn.

Klicka på **KLART** när sessionen är slut.





DEMOSKANNING

Ta reda på vilken
kartenoidvärde du har

MODUL

Om du klickar på modulen Demoskanning kommer en skärm att öppnas då appen väntar på att starta en skanning. Demoskanningar är engångsskanningar som inledningsvis inte sparar några användaruppgifter och kan inte användas till omskanningar. Demoskanningens resultat kommer dock att läggas till i den befintliga skannergruppen.

Efter att du har tryckt på modulen Demoskanning kommer appen att vara "Väntande" för att börja skanna igen. Ta bort locket från skannerns nos och låt den skannade personen placera sin handflata på mätproben. Skannern kommer att upptäcka handen och utföra en enskild 30-sekundersskanning och sedan visa resultatet.

När inskanningen är klar kan du utföra en ny Demoskanning genom att klicka på knappen Skanna längst ner. Du kan även gå tillbaka till fliken Skanna genom att klicka på den markerade ikonen.

Det finns även en knapp för anteckningar som låter dig lägga till en anteckning om ett specifikt skanningsresultat. Anteckningar är praktiska när någon kan vara intresserad av att få mer information vid ett senare tillfälle. Eventuella anteckningar kan ses senare i sektionen Demoskanningar under fliken Poster.

Du kan även omvandla en demoskanning till en komplett skanning genom att klicka på knappen Skapa konto när demoskanningen har avslutats. Detta kommer att skapa ett nytt konto för skannade personer för Demoskanningen när skanningen genomförs via modulen Skanna. Detta alternativ är praktiskt när en person påbörjar sin skanning i modulen Demoskanningar, men önskar köpa produkter eller ange en ADR efter skanningen.

Det finns ingen gräns för hur många Demoskanningar en operatör kan utföra. Demoskanningar är främst tänkt till stora grupper där en skannerägare/operatör vill skanna in personer snabbt, utan att samla in detaljerad information om dem.



MULTISKANNING

Ta reda på vilken
karotenoidvärde du har

MODUL

Multiskanning är ett nytt alternativ för skannade personer som vill få ett resultat med mindre variation det man får vid en normal 30-sekundersskanning. Mutli-Scans kommer att utföra skanningssekvenser om 90 sekunder där genomsnittet beräknas från tre skanningsomgångar. Detta kommer att generera ett värde som är mindre sårbart för de som ligger utanför gränsvärdet eller har en normal variation och är därmed mer representativt för en persons "äka" karotenoidvärde.

Om man klickar på modulen Multiskanning kan appen agera som om någon hade klickat på modulen Skanna. Användaren kommer att flyttas till Vem vi skannar-sidan för att antingen välja från den befintliga användarlistan eller skapa en ny skannad person.


När appen går vidare till sidan "Väntar" kommer skannern att visa en trippeluppsättning av nedräknande timers i mitten av skannerskalan med tre handikoner i mitten. Dessa representerar de tre skanningar som S3-skannern kommer att utföra under multiskanningen.

Ta bort de mörka locket och placera handen från personen som ska skannas på mätproben. I motsats till en normal skanning bör den skannade personen HÅLLA KVAR handen på S3-skannern tills dess att de tre inskanningarna är klara. Detta tar 90 sekunder, jämfört med en normal skanning som endast tar cirka 30 sekunder.

Under multiskanningen kan operatören trycka på profilikonen längst upp på skärmen och lägga till demografisk information. Skannerförloppet kommer fortfarande att visas i en liten skannercirkel uppe till vänster om demografiskärmen.

När alla tre värden har samlats in kommer appen att ta medelvärde för att tillhandahålla ett slutgiltigt värde. Användaren kan klicka på knappen med de tre händerna för att se de enskilda värdena som har använts för att beräkna resultatet från multiskanningen.

Multiskanningsvärdet är bäst för personer som vill ha en mindre variation vid beräkningen av sina karotenoidvärden. Alla vetenskapliga beräkningar innehåller vissa variationer. THV-skanningen, kombinerat med rätt skanningsmetoder, kommer att visa den lägsta variationsmängden som ett S3-instrument kan uppnå i förhållanden utanför laboratoriet.

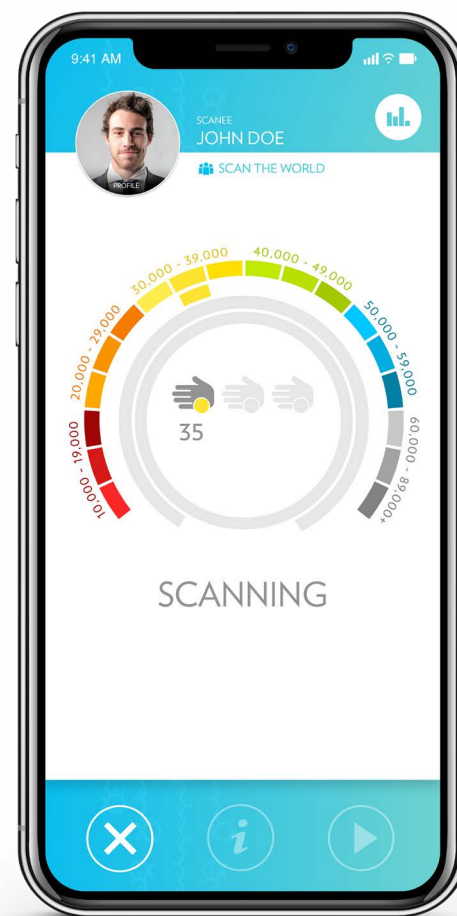



BLI SKANNAD
Skanna min QR-kod
för att påbörja en skanning

MODUL

Modulen Bli skannad ger appanvändaren en ytterligare en identifieringsmetod medan skanning sker. Personen som ska skannas av kan ladda ner appen i sin personliga enhet genom att logga in i kontot med sina användaruppgifter, använda modulen Bli skannad och visa en unik QR-kod för operatören som utför skanningen.

Skannerägaren/-operatören kan sedan skanna QR-koden för personen som ska skannas eller använda knappen QR-skanning för att utföra en skanning. Appen kommer att känna igen koden och tilldela skanningen till kontot. Modulen Bli skannad gör skanningen mer bekväm, eftersom den helt ersätter användningen av skannerkort och tryckta streckkoder.

OBS! Skannerresultatet från S3-modulen Bli skannad kommer att räknas in mot målet för leasingtagaren av den använda S3-skannern om en betald leasingkostnad.

EN SLUTLIG NOTIS OM SKANNING

Det är ett känsligt ämne att spara information via en skanner. Många människor kanske vill undvika att dela för många uppgifter, i synnerhet om de måste ange dem i någon annans mobila enhet. Dessa personer kan känna sig mer bekväma med att installera appen på sin egen enhet och använda alternativet Bli skannad.

Inskanningar kommer alltid att spara i det konto som har använts för åtkomst till appen. Se till att kontot som används i appen är det konto som får kredit för skanningen.

S3-skannern leasas av en specifik återförsäljare, men inskanningarna utförs inte alltid av leasingtagaren. Vissa grupper kan exempelvis leasa en enda S3-skanner och dela den mellan flera återförsäljare. Skanneruppgifterna kommer att vara synliga båda i det konto som används i appen när inskanningen genomförs och för skannerns leasingtagare.

Fliken Poster

Informationen under fliken Poster är till för att hjälpa skanneroperatörer att se den generella listan över alla genomförda skanningar i det kontot. Om man vill se sin egen skanningshistorik kan man använda modulen Mina resultat under fliken Skanna.



UPPGIFTER OM SKANNADE PERSONER

Genom att klicka på fliken Poster öppnas en lista med de skannade personerna. De enda skanningsuppgifterna som är synliga i denna modul är de som har skannats in genom att använda ett specifikt ägar-/operatörskonto. En skannerpost som skannades in när "John Doe" loggade in i appen kommer inte att synas när en annan ägare/operatör är inloggad i appen, även om den skannades in från samma S3-enhet. Det är därför viktigt att kontrollera vilket konto som används när man söker efter skannade personer.

Skannerposterna kommer att visas i kronologisk ordning och är skrollningsbar via pekskärmen eller går att söka igenom genom att använda sökrutan.

Om en skannerpost väljs visas en lista över värden för den posten. Denna skärm liknar den för skannerresultatskrmen i slutet av skanningen. Du har liknande alternativ nedanför värdena: visningsfaktorer, trender och jämförelser. Du kan även utföra en annan inskanning från denna skärm. För att återvända till skanningslistan, tryck på knappen Tillbaka.

Fliken Rapporter

Den grafiska ikonen öppnar upp modulerna för fliken Rapporter. Dessa moduler innehåller kraftfulla verktyg, rapporter och annan information som kan användas på många olika sätt.

Modulerna som är tillgängliga under fliken "Rapporter" inkluderar Skannergrupper, Jämförelse, Skanneraktivitet downline och Status för betald leasingkostnad.

Verktygen under fliken Rapporter är kraftfulla. Data kan visa viktiga trender, spåra framgång över tid, jämföra resultat och ha många andra användningar.





Modulen Skanningsgrupper tillåter användare att skapa skanningsgrupper där de kan lägga genomförda skanningar. Eventuella skanningar som utförs medan en skanner är inloggad i en skanningsgrupp används för att skapa en anpassad databas. Datan i gruppen visas som en graf och kan spåras över tid.

Genom att klicka på modulen Skanningsgrupper öppnas en lista över alla skanningsgrupper som det befintliga kontot har gått med i. Om kontot aldrig har gått med i någon skanningsgrupp kan du trycka på knappen längst upp till höger för att antingen skapa en ny skanningsgrupp eller för att gå med i en redan befintlig grupp. Varje grupp listas efter namn, med den aktiva skanningsgruppen (om någon) markerad i blått längst upp.

Klicka bara på gruppen för att visa data i en skanningsgrupp. Detta kommer att öppna en graf som visar alla skanningar som har genomförts i gruppen. Denna sida kommer även att lista andra fakta såsom totalt antal skanningar i gruppen, medelvärde och mer.

Aktiv skanningsgrupp

För att ställa in appen så att den använder den valda skanningsgruppen, klicka på knappen "Gå med i skanningsgrupp" längst ner på skärmen. Appen kommer att visa ikonerna för skannade grupper i det övre högra hörnet när en skanner som är ansluten till en skannergrupp utför en skanning.

Lämna befintlig skanningsgrupp

Om du vill att appen ska sluta använda den befintliga skanningsgruppen, klicka på knappen "Lämna skanningsgrupp" längst ner på skärmen. Du kan endast lämna en skanningsgrupp om du har en aktiv skanningsgrupp.

Skapa/gå med i en skanningsgrupp

För att skapa en ny skanningsgrupp, klicka på ikonerna i det övre högra hörnet. Det kommer att öppna upp en popup-meny som tillåter användare att antingen skapa en ny grupp eller att ställa in appen så att den använder en redan befintlig grupp.

Välj alternativet "Skapa grupp" när du vill skapa en ny skanningsgrupp. Skannerägare/-operatörer kanske vill skapa grupper för ett specifikt evenemang eller för vissa personer de vill hålla koll på. För att skapa en grupp, ange ett namn, en fyrsiffrig PIN och en kort beskrivning av gruppen.

VIKTIGT: Se till att du kommer ihåg gruppnamnet och PIN-koden. Om du tar bort en skanningsgrupp från appen är det enda sättet att gå med i den igen att ange rätt namn och PIN-kod.

Välj alternativet "Gå med i befintlig grupp" för att be appen gå med i en skanningsgrupp som redan finns. Genom att ange gruppens namn och PIN-kod kommer appen att lägga till eventuellt nya skanningar som har gjorts i kontot i den valda skanningsgruppen. Du kan gå med i vilken skanningsgrupp som helst bara du känner till namnet och PIN-koden.



Modulen Dynamisk jämförelse är ännu ett verktyg för skannade personer. Denna modul låter en person logga in i appen och jämföra sina mest nyliga resultat mot skanningsresultat i en enorm databas med svar från hela världen. Denna data används till jämförelser och hålls helt anonym för att skydda användarens integritet.

Vid användning kommer modulen Dynamisk jämförelse att visa en kurvgraf i grått med de senaste skanningsresultaten markerade i färg. Nedanför grafen kommer du att se en ruta som heter "Globalt" och fler rutor som har ett "+"-tecken på insidan. Grafens klockkurva representerar värdena för alla skannade personer över hela världen med deras enskilda värden framför för jämförelse.

Genom att klicka på rutan "Globalt", kan den skannade personen ändra den globala parametern till ett anpassat filter. Ett anpassat filter kan baseras på saker som plats, kost och profil. Om man exempelvis ställer in filtret på ett Högt intag av frukt och grönt kommer en kurva att visas med alla skannade personer som har ett högt intag av frukt och grönt och deras senaste värde framför för jämförelse.

STAPLAR MED OLIKA DEMOGRAFISKA EGENSKAPER



Skannade personer kan ta det ett steg längre genom att klicka på rutan "+" för att ange ytterligare filter. Varje ruta ger en rad olika demografiska alternativ att välja mellan. Om du väljer den demografiska egenskapen Ålder kommer ett fönster att öppnas som låter dig välja en ålderskategori för den dynamiska jämförelsen.

Användare kan skapa flera olika filterkombinationer för att jämföra resultaten med sina egna skanningsresultat. De kan exempelvis jämföra sina värden med värden från kvinnor med oregelbundet kosttillskottsintag.

Allteftersom fler personer anger sina uppgifter i databasen kommer ännu fler alternativ att bli tillgängliga och datan kommer att bli mer representativ. Potentialen hos informationen i Dynamic Comparison Module är obegränsad. Besök S3-skannerns YouTube-kanal för att lära dig mer om denna nya, viktiga funktion.

VIKTIGT: Det går inte att skapa dynamiska grafer som är 100 % korrekt representerade av hela skannerdatabasen. Databasen innehåller miljontals skanningsresultat och triljoner möjliga demografiska kombinationer. Det går inte att spara en sådan stor databas på ett sätt som är enkelt överförbart till en mobil enhet. Graferna i verktygen Dynamisk jämförelse är ungefärliga av den kompletta databasen skapad genom att använda metoder för datamedelvärden.



SKANNERAKTIVITETER DOWNLINE

MODUL


Modulen Skanneraktiviteter downline är ett verktyg för affärsledare för att spåra skanneraktiviteten för sina downlines med ett djup ner till maximalt sex nivåer. Denna information kan vara värdefull för att hjälpa ledare att maximera sina resultat.

OBS! Denna modul erbjuder endast downline-information som är relevant för det kontot som du är inloggad på i appen. Inloggade konton i appen utan någon downline-verksamhet kommer inte att se denna information i rapporten.

I huvudfönstret finns en lista över skanneroperatörer (inklusive leasingtagare) som har utfört skanningar under de valda månaderna tillsammans med antal skanningar utförda per operatör. En stapel visar resultatet från de senaste sex månaderna. Varje månad kan klickas på separat. Antalet skanningar utförda av downline-personen för det konto som användaren är inloggad i listas under den valda månaden.

Du kan även sortera listan genom att klicka på "Operatör" längst upp. Detta kommer att sortera operatörslistan alfabetiskt. Genom att klicka på "skanningar" kommer operatörslistan att ordnas efter antalet skanningar de har genomfört.

Klicka bara på knappen Tillbaka för att återgå till fliken Rapporter

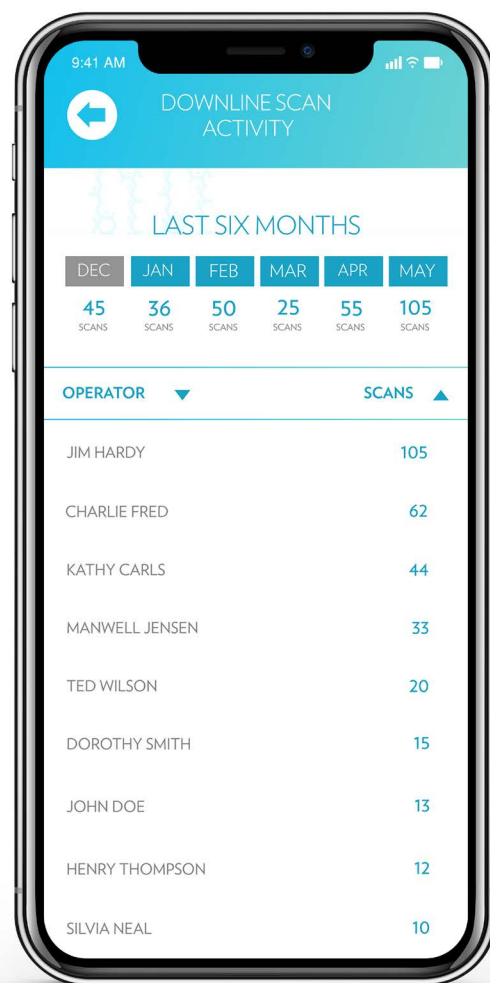




BETALD LEASINGKOST- NAD STATUS

MODUL

Modulen Betald leasingkostnad är ett verktyg som visar en leasingtagares månatliga förlopp mot att uppnå resultatet som tar bort avgiften för skannerleasingen. Olika marknader följer olika program, så denna modul kommer inte att vara tillgänglig såvida det inte finns ett program om betald leasingkostnad för din marknad.

Om man klickar på modulen kommer en skärm att öppnas med några termometergrafer som visar antalet ADR:er och GSV:er som kontot har ackumulerat under månaden. När kontot har uppnått något av målen kommer leasingavgiften att tas bort för den månaden.

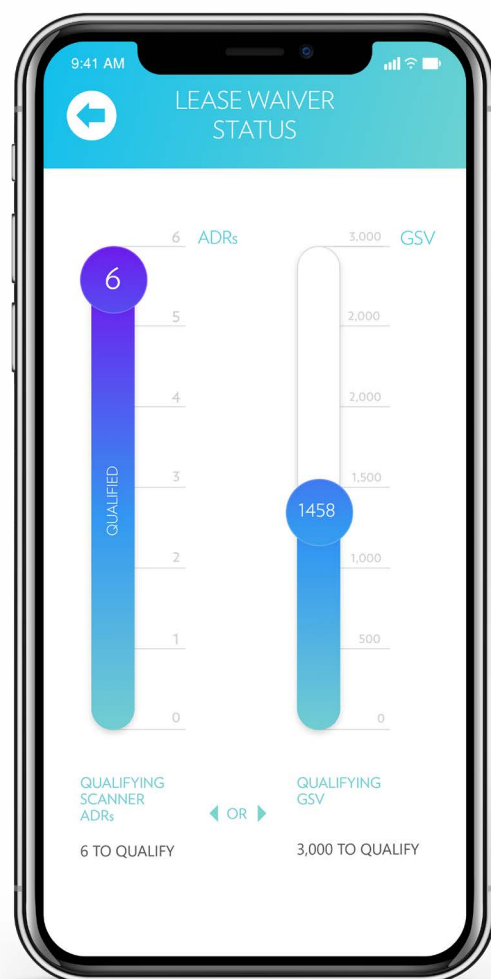

Fliken Support


Den fjärde fliken i S3-appen ger åtkomst till supportmodulerna. Dessa moduler ger praktisk information, besvarar frågor och tillhandahåller utbildning.





KONTAKTA SUPPORTEN

MODUL

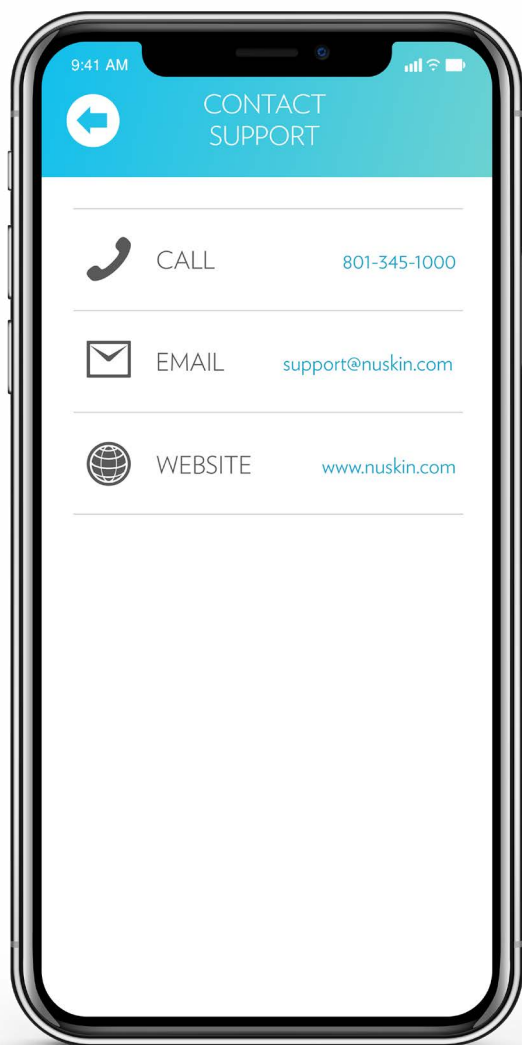


Klicka på modulen Kontakta supporten för att se en lista över alternativ för teknisk assistans. Detta inkluderar telefonnummer, e-post och webbplatsreferenser. Om du använder en smart enhet behöver du bra klicka på alternativen för att påbörja en kontakt.



Genom att öppna skannerdokumentsmodulen visas en lista över referensdokument om olika ämnen. I standardappen finns en användarhandbok, en snabbstartsguide och en guide för Bluetooth-anslutning.


Andra dokument kan läggas till i skannerdokumentmodulen efter Nu Skin Enterprises eller efter lokala marknader.

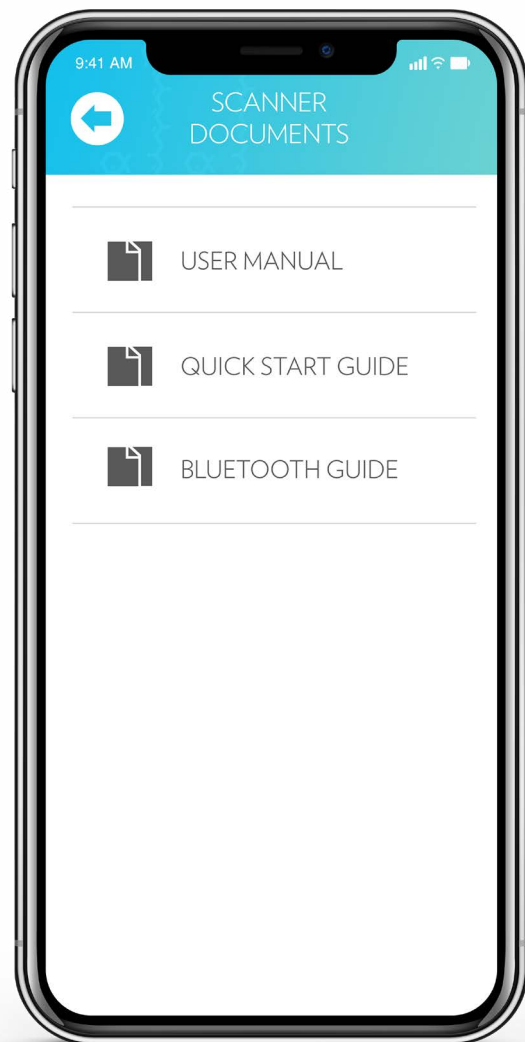



SKANNER UTBILDNING

MODUL

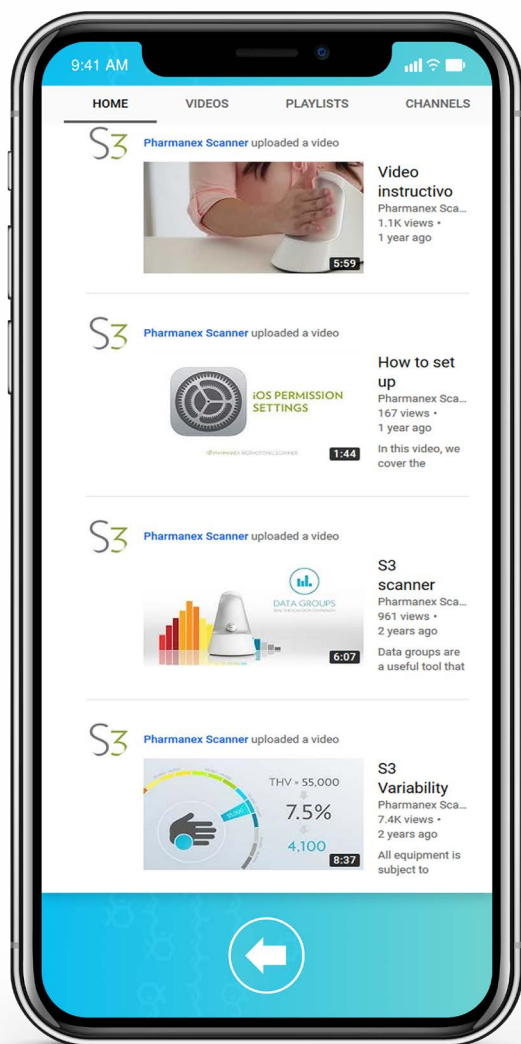

Modulen Skannerutbildningar innehåller referenser till utbildningsvideor om S3-skannern på YouTube. Klicka på ikonen YouTube för att omdirigeras till kanalen och ta del av dessa videor.

Du kan även lägga till dina egna länkar i modulen Skannerutbildningar genom att klicka på ikonen LÄGG TILL i det övre högra hörnet och lägga in önskade URL:er. Lägg till dina egna videor för dina specifika program.




SKANNER STATUS

MODUL

Denna modul innehåller den befintliga statusen hos skannern som appen är ansluten till. Den innehåller även hårdvaran till S3-skannern (använd för support), befintlig appversion av S3 Scanner App och firmware-versionen med maskinkod för S3-skannern (använd för support).

Knappen längst ner på sidan används för att uppdatera skannerns firmware när nya versioner släpps.

OBS! Det kan ta upp till 15 minuter att uppdatera skannerns firmware. Följ instruktionerna i appen noggrant och använd endast denna funktion när du har tillräckligt med tid.

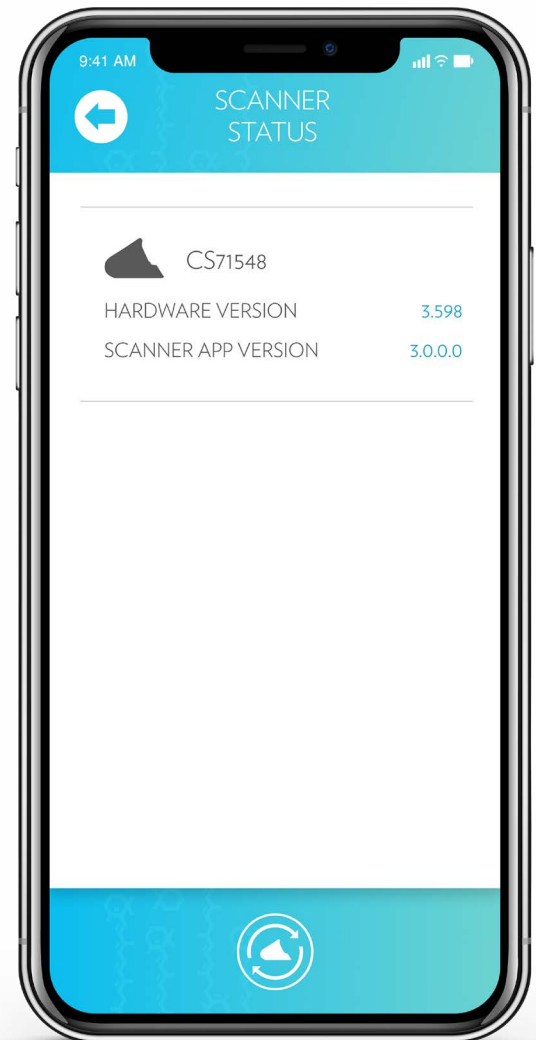

Skannerfakta

RESONANT RAMAN-SPEKTROSKOPI

Resonant Raman-spektroskopi är en vetenskaplig princip som upptäcktes 1922 av C.V. Raman. Ljus med en särskild våglängd introduceras i ett material. Molekylerna i det exponerade materialet ger resonans åt frekvensen och den skiftar ljuset till en annan frekvens i en process som kallas för Ramanspridning. Mängden ljus som kan spridas kan beräknas genom att räkna fotonerna i den nya frekvensen. Beräkningen blir en direktkvantifiering av det önskade materialet.

BioPhotonic Scanner skickar 478 nanometer blått ljus in i hudens vävnad. Detta blå ljus kommer endast att reagera med karotenoid-molekyler. När karotenoidmolekyler ger resonans åt det blå ljuset skiftar de våglängden till 518 nanometer gröna fotoner.

BioPhotonic Scanner har utformats för att släppa ut exakt den våglängd som krävs för att ge resonans på molekyler och sedan räkna resultatet för Ramanskiftade ljus. Det är en väldigt specifikt utformad applikation för beräkning av Resonant Raman-effekten och den ägs av Pharmanex LLC.



EGEN NÄRING

Veten Skap och teknik

För Fra Mtiden

DET ALLRA SENASTE

Optiska signaler via resonans Ramanspetroskopi ger dig nivåerna av karotenoider i huden (SCS).



BEVISAD

Fler än 50 granskade artiklar validerar vetenskapen bakom skannern.

PERSONLIG

Skannern ger dig en **personlig** upplevelse där du får hjälp att förstå din egen näringsstatus, vilket **motiverar** till ändrade vanor.

FRAMTID UTAN GRÄNSER

Vi går i spetsen för en teknik som kan bli ett vardagligt verktyg för att stödja välbefinnandet. Föreställ dig möjligheterna:

- Mindre utrustning
- Snabbare apparat
- Lättburen
- Mer personlig
- För hemmabruk

HUDENS KAROTENOIDVÄRDE

Ditt karotenoidvärde är en beräkning av den senaste karotenoidnivån i din hud. Karotenoider är viktiga pigment som finns i viss frukt och grönt. Karotenoider neutraliserar skadliga molekyler och absorberas i mänsklig plasma och vävnader.

I motsats till andra beräkningsmetoder (som fluktuerar över dagen) visar ditt karotenoidvärde en stabil mängd karotenoider i huden. Värdesystemet baseras på data som samlats in från fler än 1 300 personer med olika typer av kost. Din huds karotenoidvärde kommer att hjälpa dig att se om du får i dig tillräckligt stor mängd näringsämnen som innehåller karotenoider.

Dina individuella värden kan variera baserat på faktorer som kost och fysisk aktivitet. Ditt värde kan även variera beroende på din genetiska förmåga att absorbera karotenoider. Även om ett visat karotenoidvärde ger dig en allmän förståelse för hur ditt värde står sig i förhållande till resten av befolkningen är ditt värde unikt för dig.

Genom att spåra efterföljande värden får du större insikt i dina karotenoidnivåer än om du jämför ditt första värde mot värden i Skin Carotenoid Score Index. Det är även viktigt att observera att, precis som vid många biologiska beräkningar, värdet kan variera inom ett begränsat intervall.



MED SKANNERN KAN DU ENKELT SPÅRA
LIVSSTILSFÖRBÄTTRINGAR ÖVER TID.

FAKTORER **TYPISKT** ASSOCIERADE MED SCANNERPOÄNG



MATVANOR



**INTAG AV
KOST-
TILLSKOTT**

LÅGT INTAG
AV FRUKT/GRÖNSAKER

OREGELBUNDET
ELLER INGA INTAG
AV KOSTTILLSKOTT

MÅTTLIGT INTAG
AV FRUKT/GRÖNSAKER

REGELBUNDET INTAG
AV KOSTTILLSKOTT

ÖVER GENOMSNITTLIGT
INTAG AV
FRUKT/GRÖNSAKER

HÄNGIVET INTAG AV
KOSTTILLSKOTT

DESSA ÄR ALLMÄNNA PARAMETRAR
BASERADE PÅ ÖVER 20.000.000
SKANNINGAR. DIN INDIVIDUELLA
SCS KAN VARIERA.



Variabler

VARIABLER

Resultaten från skanningsutrustningar kan variera. Det är inte en fråga om huruvida det kommer att finnas en variation eller inte. Det är en fråga om hur stor variation som finns. Det går inte att utesluta variation på utlästa värden helt men de kan minska om du kalibrerar och kontrollerar utrustningen regelbundet.

Det finns bara små mängder karotenoidmolekyler i mänsklig vävnad. Den exakta koncentrationen av karotenoidmolekyler i hudvävnaden för en typisk person är cirka 19+ nanogram per milligram (19+ ug/mg).

Hur litet är det? I korthet innebär det att för varje MILJARD vävnadsmolekyler finns det normalt sett mindre än 30 karotenoidmolekyler. Denna beräkning heter Parts per billion (PPB, antal per miljard).

PPB-beräkningar är extremt svåra. Det är både normalt och förväntat att det blir variationer från skanning till skanning, även om samma person skannas flera gånger. Om ett S3-resultat inte verkar vara normalt, rekommendera då en multiskanning istället. Multiskanningar ger ett resultat som är mer tillförlitligt än normalvärdet med normal variation.

Den vanliga variationen på en korrekt kalibrerad 3S BioPhotonic-skanner är runt 15 %.

HANTERA VARIATIONER

Även om variation förväntas kan den hanteras och minskas med hjälp av bra skanningmetoder.

- Skannern bör placeras på en platt yta och med enkel åtkomst från personen som ska skannas.
- Personer som ska skannas bör sitta bekvämt utan att säcka ihop, sträcka sig eller luta sig.
- En person som ska skannas bör hålla skannern still under inskanningen och inte byta positioner.
- Handflatan bör placeras på skannerproben mellan handflatas två huvudlinjer cirka en centimeter upp från handflatans bas (hjärtlinjerna).
- Handen bör börjas lite istället för att hållas platt eller för böjd.
- Hjälp personen som ska skannas att placera sin hand på rätt sätt, så att han/hon skannar samma punkt av handflatan varje gång. **En dålig handplacering är den vanligaste orsaken till skanningsvariation.**
- Handtryckningen på handens nos bör göras försiktigt men bestämt. Handen ska placeras på ett bestämt sätt, men inte tryckas för hårt.
- Personer som ska skannas av bör hålla handen tryckt i samma vinkel varje gång den skannas av.

- # SCANNER VARIABILITY
- NORMAL VARIATION IN SCIENTIFIC MEASUREMENTS




Tips och råd

HANDPLACERING

Skanningsprocessen är ganska enkel, men många personer känner sig obekväma med att arbeta med vetenskapliga instrument. Här kommer några tips som hjälper dig att komma igång. Med lite övning kan vem som helst bli en skannerexpert.


Rengör skannerns nos och front regelbundet med en mikrofibertrasa för att ta bort oljor och andra residualer.

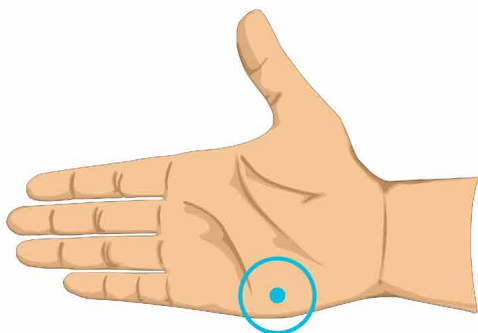

POSITION

DEN SKANNADE BÖR:

- SKANNAS MELLAN HJÄRT- OCH HUVUDLINJEN
- SKANNAS PÅ SAMMA OMRÅDE I HANDEN VARJE GÅNG
- GREPPA TAG OM SKANNERN

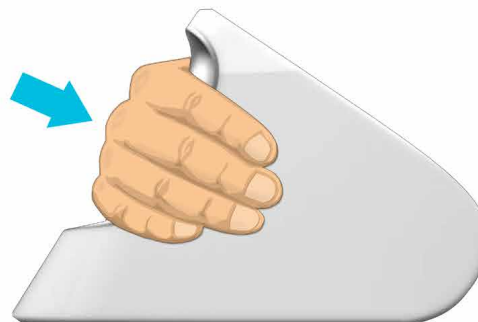

TRYCK

DEN SKANNADE BÖR:

- HÅLLA HANDEN MOT KONEN
- INTE TRYCKA FÖR HÅRT
- HÅLLA SAMMA TRYCK VARJE GÅNG

BLUETOOTH-ANSLUTNING

Stäng inte av din S3-skanner medan S3-appen körs.

Tryck inte på Bluetooth-knappen på enhetens baksida efter att den är ansluten. Om du gör detta återställs Bluetooth-anslutningen vilket ibland kan orsaka signalavbrott.

Bluetooth-knappen och strömknappen kan tryckas in av misstag när man lyfter upp S3-skannern. När S3-skannern flyttas under skanning, var försiktig så att du inte råkar trycka på någon av dessa knappar.

OPTIMALA RUTINER

Lär dig dessa tre regler om varje aspekt av skannern för att hålla din enhet igång, smidigt fungerande och med enhetlig värdeuppskattning.

KONSTANS

REGLER

OMVÅRDNAD

HÅLLNING



DEN SKANNADE BÖR:

- SITTA BEKVÄMT
- INTE HOPSJUNKEN
- INTE STRÄCKA SIG UT
- SITTA STILL UNDER SKANNINGEN

SKANNA



FÖR BÄSTA RESULTAT:

SKANNA I RUMSTEMPERATUR (15° - 27° C).

INNAN SKANNING, KÖR MED LOCK PÅ NÅGRA GÅNGER. FÖR ATT MINSKA LJUDNIVÅERNA.

BEHANDLING



HANTERA SKANNERN VARSAMT.

SÄTT ALLTID NED SKANNERN FÖRSIKTIGT, KASTA ELLER TAPPA DEN INTE, INTE ENS NÄR DEN FÖRVARAS VADDERAT.

POSITION



DEN SKANNADE BÖR:

- SKANNAS MELLAN HJÄRT- OCH HUVUD-LINJEN.
- SKANNA SAMMA OM-RÅDE I HANDEN VARJE GÅNG
- GREPPA TAG OM SKANNERN

MILJÖBYTE



GE TID ÅT APPARATEN ATT ACKLIMATISERA SIG TILL RUMSTEMPERATUR OM DU FLYTTAT DEN FRÅN VARM ELLER KALL MILJÖ.

TRANSPORTERING



SKANNERN ÄR ETT KÄNSLIGT INSTRUMENT.

NÄR DU FRAKTAR APPARATEN, SE TILL ATT SKYDDA DEN SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.

TRYCK



DEN SKANNADE BÖR:

- HÅLLA HANDEN MOT KONEN
- INTE TRYCKA FÖR HÅRT
- HÅLLA SAMMA TRYCK VARJE GÅNG

FÖRVARING



UNNDVIK EXTREMT KALLA ELLER VARMA TEMPERATURER.

FÖRVARA I TEMPERATUR MELLAN 5° - 43° C.

UNDER RESA



TA ALLTID SKANNERN SOM HANDBAGAGE NÄR DU FLYGER.

INCHECKAD KAN DEN UTSÄTTAS FÖR SKADA.

Tekniska specifikationer

Driftstemperatur: 10 till 35 °C

Optimal driftstemperatur: 20 till 25 °C

Förvaringstemperatur: 5 till 40 °C

Operativ fuktighetsnivå: 10 till 90 % icke-kondensering

Operativ höjdnivå: 0 till 3 000 m

EMC: EN 61326-1:2013; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-3-2:2006

Säkerhet: EN 61010-1:2010

Vikt: 1,46 kg

Höjd: 16,8 cm

Längd: 23,5 cm

Bredd: 11,6 cm



CE-markeringen på produkten är tillverkarens deklaration om överensstämmelse, vilket innebär att produkten uppfyller kraven i Europarådets direktiv 2006/95/EG, 2004/108/EG och 1999/5/EG



S3-skannern är en digital enhet av klass B som efterlever del 15 av FCC:s regler. Användningen är föremål för följande två förhållanden: (1) denna enhet kan orsaka skadliga störningar, (2) denna enhet måste godkänna eventuella störningar som mottas, inklusive störningar som uppstår på grund av felaktig användning.



Denna symbol anger att enheten är listad av Canadian Standards.



Denna symbol visar att enheten inte bör kasseras av konsumenten. Den måste skickas tillbaka till Pharmanex LLC för kassering.



Efterlevnad av begränsning av användning av farliga ämnen.

VARNING

Det finns inga delar inuti som kan bytas ut av användaren. Alla komponenter är specialanpassade och får inte ändras på något sätt. Om du tar bort eller skadar etiketten kommer alla garantier att sluta gälla.