



Att synka skannern betyder:

ATT ÖVERFÖRA DATA FRÅN SKANNINGARNA FRÅN DIN SKANNERAPPARAT TILL EN GLOBAL NU SKIN-SERVER.

FÖRDELAR:

- ✓ I dina skannerrapporter får du en översikt av hela din skanneraktivitet.
- ✓ Skanningar och ADR-beställningar kopplas ihop.
- ✓ Nu Skin kan betala ut din skannerbonus.



S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Synka din skanner med App 2.0

- ✓ Efter varje skanning,
- ✓ minst var 14:e dag och
- ✓ inte senare än månadens sista arbetsdag.

Om din skanner inte har synkroniserats inom 14 dagar inaktiveras den automatiskt. Du kan endast genomföra ytterligare en skanning efter en ny synkronisering.

Titta under fliken "Records" så ser du hur många dagar du har kvar innan nästa synkronisering:



RECORDS PENDING	0
LAST SYNC	03/31/14 3:52 du.
DAYS REMAINING	14
SYNC STATUS	OK

Synka din skanner med App 2.0

Din skanner synkroniseras automatiskt så länge din iPad* är ansluten till ett trådlöst nätverk.

- Alla **synkade** skanningar visas som:



- Alla **icke-synkade** skanningar visas som:



- För att synka, tryck på knappen:





Synka din skanner med App 3.0

Dina skannningar synkas automatiskt så länge som din enhet* är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Om dina skannningar inte har synkats bör du ansluta din enhet till ett Wi-Fi-nätverk igen (inte senare än den sista arbetsdagen i månaden) så synkas alla skannningar automatiskt.

**S3 Scanner Application 3.0 har utvecklats för iOS 12 och senare versioner, för iPhone och iPad.*

S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

